

## Mode d'emploi de l'application VRC en complément de la formation donnée en présentiel

### 1. Introduction

Les utilisateurs mobiles peuvent créer et gérer des salles virtuelles, contrôler le téléchargement et la diffusion de vidéos et audios à 360° vers des appareils VR Pico. Cette application utilise la technologie Photon PUN2 pour assurer une connexion multijoueur stable et sécurisée, permettant ainsi aux utilisateurs de partager une expérience VR synchronisée sans compromettre la confidentialité des données.

L'application VRC est spécialement conçue pour :

- **Synchroniser les expériences multimédia** : Connectez plusieurs casques VR à une session mobile unique pour une diffusion simultanée.
- **Gérer le contenu à distance** : Téléchargez et contrôlez des vidéos et audios directement depuis votre appareil mobile vers les casques VR, avec des options de personnalisation complète pour chaque session.
- **Offrir flexibilité et contrôle** : Choisissez parmi des profils prédéfinis ou personnalisez les paramètres de média et de durée selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Ce mode d'emploi vous guidera à travers les étapes de configuration, d'utilisation et de maintenance de l'application VRC pour vous assurer de tirer le meilleur parti de cette technologie. Que vous soyez un professionnel de la santé utilisant la VR, un facilitateur de méditation, ou simplement un utilisateur cherchant à explorer les possibilités de la VR, VRC est votre compagnon idéal.

### 2. Configuration Requisite

**Appareils Mobiles** : Compatible avec tous les appareils Android. Un nom de session est requis pour accéder aux fonctionnalités.

**Appareils VR** : Compatible avec Pico 4. Comme pour les mobiles, un nom de session est nécessaire pour l'accès.

### 3. Installation de l'Application

**Appareils Mobiles** : L'application est pré-installée sur les tablettes Android fournies par Virtual Reality Concept Sàrl. Les mises à jour peuvent être effectuées via le Google Play Store.

**Appareils VR** : L'application est pré-installée sur les casques VR Pico 4 fournis. Les mises à jour sont gérées directement par notre équipe via une APK.

#### 4. Démarrage Rapide

Assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau Internet pour la confidentialité des données et le bon fonctionnement.

Ouvrez l'application sur votre tablette Android et entrez le nom de session reçu.

Ensuite, ouvrez l'application sur le casque VR et entrez le même nom de session.

Installez le casque sur le patient et calibrez en appuyant sur le cercle de la manette pendant 3 secondes.




## 5. Fonctionnalités Principales

**Création de Salles :** Les utilisateurs peuvent rejoindre leur propre salle en entrant un nom de session unique donné par VRC. Contrôlez et diffusez des vidéos et de l'audio aux appareils VR qui rejoignent cette session.


### Gestion de Fichiers :

- **Téléchargement sur VR :** Pour télécharger le contenu audio et vidéo sur le casque VR, l'utilisateur doit cliquer sur la silhouette du casque VR et ensuite sur l'onglet du milieu. Une flèche indique que le fichier est prêt à être téléchargé. Une fois téléchargé, l'icône se transforme en une croix, et le texte à gauche passe du rouge au gris pour indiquer que le fichier est bien téléchargé. Cela est à faire une seule fois tant qu'il n'y a pas de nouveaux fichiers.

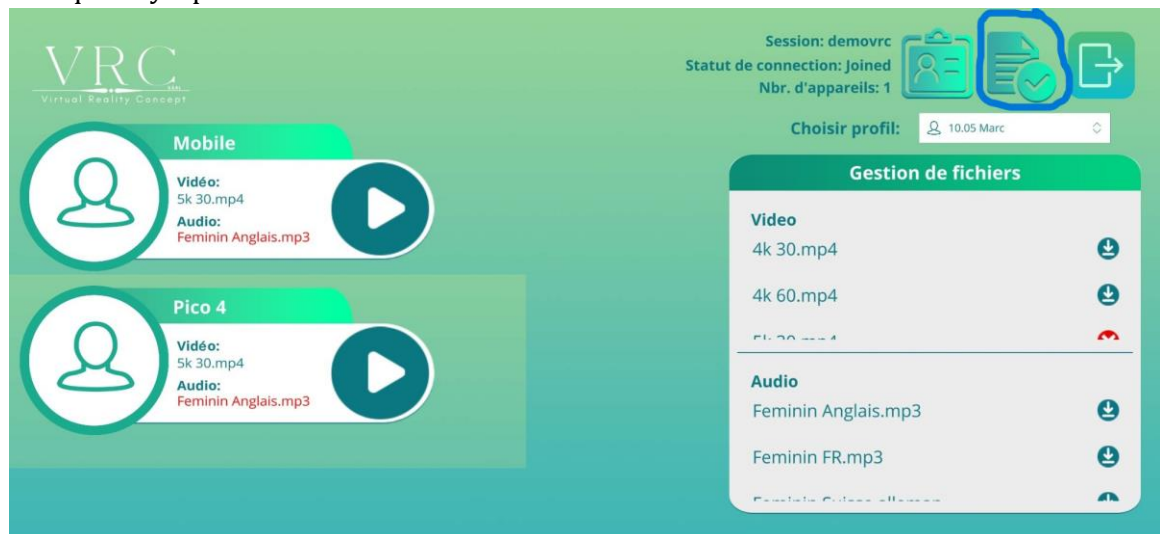

### Sélection du Profil :

- **Choisir Profil** : Les utilisateurs peuvent sélectionner le profil du patient à partir du menu déroulant 'Choisir profil'. Chaque profil est préconfiguré avec des paramètres spécifiques, incluant la vidéo, l'audio, et la durée de la session. Une fois un profil sélectionné, les paramètres se programment automatiquement.
- **Personnalisation Manuelle** : Si aucune personnalisation préalable n'a été configurée pour un patient, les utilisateurs peuvent manuellement choisir la vidéo, l'audio, et définir la durée de la session. Après avoir fait leur choix, ils doivent cliquer sur 'Mettre à jour' pour appliquer les changements.

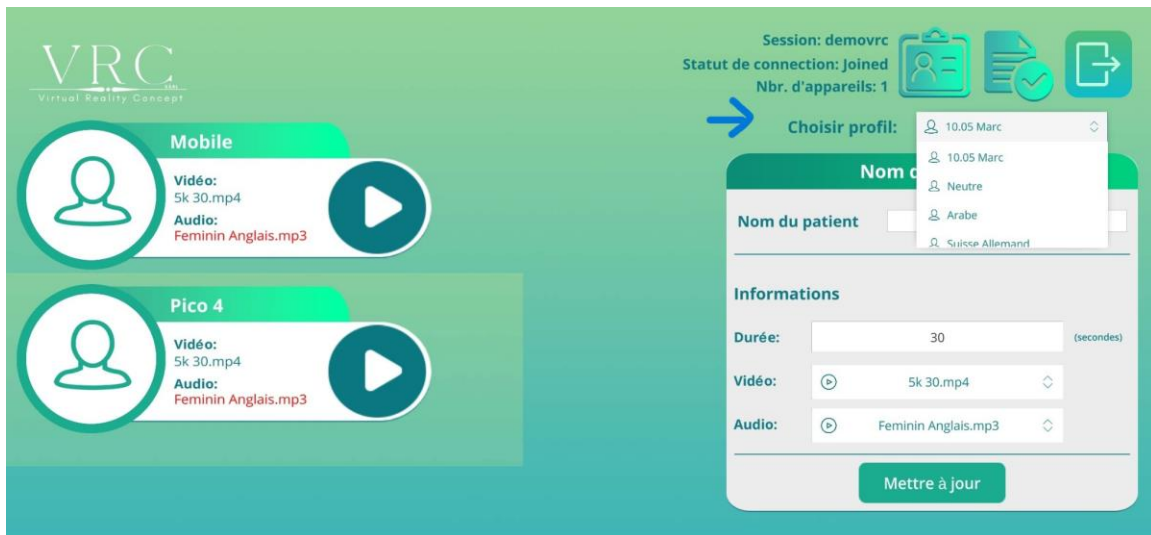

- **Lancement de l'audio et de la vidéo** : Appuyez sur le bouton Play.
- **Contrôle du temps restant** : En cliquant entre la silhouette et le bouton Play, une horloge s'affiche.

## 6. Dépannage

Si la vidéo ne se lance pas, vérifiez que la silhouette du casque est sélectionnée et que le texte n'est plus en rouge.

Si vous êtes dans une session "vide" vérifiez l'orthographe du nom de session en haut à droite.

Pour calibrer la vue, appuyez sur le cercle de la manette pendant 3 sec.

À chaque personnalisation ou à l'ajout de nouvelles vidéos, cela doit être téléchargé.

## 7. FAQ

**Comment redémarrer l'application en cas de problèmes ?** Quittez l'application puis relancez l'application et reconnectez-vous. Si cela persiste, redémarrez les appareils.

**Que faire si la vidéo ne se lance pas malgré le redémarrage ?** Assurez-vous que tous les appareils sont connectés au même réseau internet et que le contenu est correctement téléchargé et installé sur le casque.

## 8. Contact et Support

Pour toute assistance technique, veuillez contacter notre équipe de support à [contact@v-r-c.ch](mailto:contact@v-r-c.ch). Notre équipe est disponible de 8h à 18h, du lundi au vendredi et 24/24 - 7/7 selon le contrat client.

Lien de l'application sur le play store :

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Gv.VRC&hl=fr\\_CH](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Gv.VRC&hl=fr_CH)